




HUMAN CARE
Your Life. Your Way.

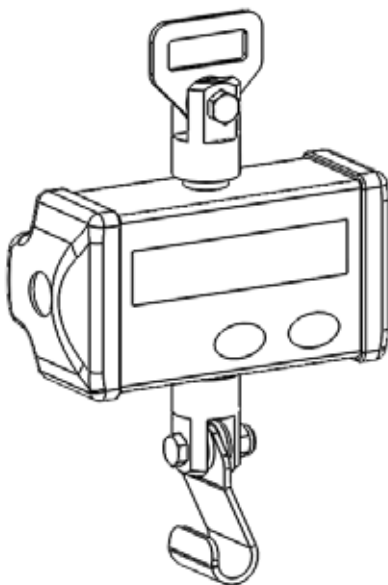

Gebruikshandleiding

Weegschaal



Inhoudsopgave

Algemene omschrijving en beoogd gebruik	3
De weegschaal monteren	4
Weging uitvoeren	4
Onderhoud	5
Technische specificaties	5

Gebruikshandleiding

Artikel nummer: 50348



Het “Waarschuwing!” driehoek wordt gebruikt wanneer extra aandacht vereist is.



Lees deze instructies aandachtig voordat u het product gebruikt. Het is belangrijk dat het apparaat alleen wordt gebruikt met de juiste Human Care producten.

Controleer voor gebruik altijd of het apparaat niet is beschadigd of versleten.

Waarschuwing: productmodificatie is niet toegestaan.

De producten van Human Care worden voortdurend doorontwikkeld of geüpdatet en wij behouden ons het recht om ontwerpwijzigingen aan te brengen zonder voorafgaande kennisgeving.

Algemene omschrijving en beoogd gebruik



De weegschaal mag alleen worden gebruikt in combinatie met Human Care producten. Verwijder de batterijen in geval van langdurige opslag.

Vorbereiding voor gebruik:

- Lees en zorg ervoor dat u deze handleiding begrijpt.

1. Haal de weegschaal uit de doos.
2. Druk op de aan/uit knop en controleer of de weegschaal wordt ingeschakeld en de batterijen niet leeg of bijna leeg zijn (het batterijsymbool is een waarschuwing).



De weegschaal monteren


De weegschaal ophangen:

1. Draai de weegschaal zodat deze bijna ondersteboven ligt.
2. Steek het ook in de haak van de afstandstrap.
3. Keer de weegschaal vervolgens om naar gebruikerspositie.

Voor demontage dienen de stappen omgekeerd worden uitgevoerd.



De lift ophangen: Zie handleiding van de lift

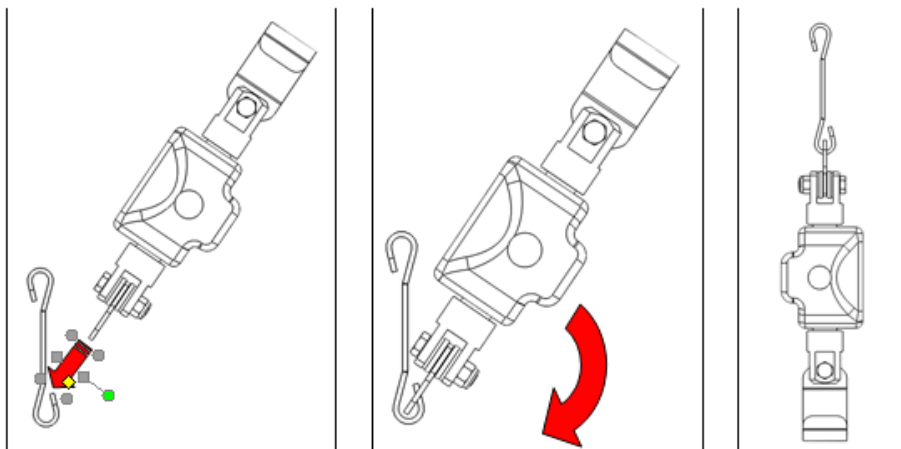

Weging uitvoeren

1. Start de weegschaal door op de aan/uit knop te drukken.



2. Voordat de patiënt wordt opgetild, stelt u de weegschaal opnieuw in wanneer de tilband aan de lift hangt en opgetild is.



3. Til de patiënt op volgens de instructies. Het gewicht wordt weergegeven op het display .

De weegschaal kan op ieder moment worden gereset om vergelijkende metingen te kunnen uitvoeren.

Als u vergeet de weegschaal te resetten voordat de patiënt wordt opgetild, kan dit alsnog gedaan worden terwijl de patiënt reeds hangt. Nadat de tilband is losgekoppeld wordt het gewicht als negatief getal weergegeven.

Onderhoud

- Schakel het product uit tijdens het schoonmaken. Het product kan worden afgeveegd met een vochtige doek en afwasmiddel. Gebruik geen agressieve schoonmaakmiddelen of andere chemicaliën.
- DuPont™ Virkon® wordt aanbevolen voor desinfectie.
- Spoel het product nooit af en dompel deze niet in water of ander vloeistof.
- Controleer regelmatig op eventuele beschadigingen van het product.

De batterijen vervangen

1. Verwijder de rechter zijkant van de weegschaal door de schroeven los te draaien.
2. Verwijder de batterij houder.

3. Vervang alle 4 de batterijen (LR6/AA), plaats de houder terug en schroef het plaatje weer vast.

Jaarlijkse inspectie

De weegschaal moet samen met de lift gecontroleerd worden.

Controleer alle onderdelen die kunnen worden blootgesteld aan slijtage.

Recycling

Een afgedankte weegschaal kan terug worden gestuurd naar Human Care of worden afgegeven bij uw gemeente waar elektronische apparaten worden gerecycled.

Technische specificaties

- Maximaal gebruikersgewicht: 320 kg
- Resolutie: 0-200 kg = 100 g, 200-320 kg = 200 g
- Fabrikant: HBM
- Batterij: 4 x LR6/AA
- Precisie klasse: OIML R76 C2/C1.6
- Omgevingstemperatuur -10...+40
- Temperatuur voor opslag: -40...+85
- IP klasse: IP54
- Eigen gewicht: 0.7kg
- Afmetingen (B x H x D): 164 mm x 265 mm x 70 mm
- Goedgekeurd volgens: 90/384/EEC

HUMAN CARE SWEDEN (HQ)

Årstaängsvägen 21C
117 43 Stockholm
Phone:- +46 8 665 35 00
Fax:- +46 8 665 35 10
E-post: info.se@humancaregroup.com
www.humancare.se

HUMAN CARE CANADA

10-155 Colonnade Road
Ottawa, ON K2E 7K1
Phone:- 613.723.6734
Fax:- 613.723.1058
Email: info.ca@humancaregroup.com
www.humancaregroup.com

HUMAN CARE UNITED STATES

4210 S. Industrial Drive, Suite 160
Austin, TX 78744
Phone: 512.476.7199
Fax: 512.476.7190
Email: info.us@humancaregroup.com
www.humancaregroup.com

HUMAN CARE AUSTRALIA

Unit 4, 49 Bertie Street
Port Melbourne, Victoria 3207
Phone:- 1300 132 736
Fax:- [03] 9645 4954
Email: info.au@humancaregroup.com
www.humancaregroup.com

HUMAN CARE NETHERLAND

Elspeterweg 124
8076 PA Vierhouten
Phone: 0577-412171
Email: info.nl@humancaregroup.com
www.humancare.nl