

Universele Gebruiksaanwijzing

Tilbanden

Geldig voor navolgende soorten.

Uitgerust met (veilige) clips of lussen



Lopen



Staan



Zitten



Liggen



Obesitas



Kinderen



Tilband op Maat (TOM)

*Til- en hygiënehulpmiddelen
Service en Onderhoud
Advies en Training*

Introductie

Gefeliciteerd met uw aanschaf van een Human Care Nederland tilband!

Wij zullen er alles aan doen om ervoor te zorgen dat u efficiënt en met plezier vele jaren met dit product kunt werken. Human Care Nederland bestaat al sinds 1996 en heeft vanaf het begin kwaliteit van product en dienst boven alles gesteld. Zo zijn wij sinds 1999 in het bezit van het ISO 9001 certificaat en dragen al onze producten het CE keurmerk. Wij hopen dan ook dat u dit zelf ervaart in het dagelijkse gebruik van dit product.

Voor zowel de patiënt als de hulpverlener is een juist gekozen tilband van groot belang.

Onnodig ongemak, pijn en een verkeerde houding zijn problemen die beperkt kunnen worden door goed gebruik van de juiste tilband.

Er zijn verschillende soorten tilbanden, die gekozen worden op hun functionaliteit en kunnen aangepast worden aan de behoeften en mogelijkheden van de persoon.

Directe communicatie met onze eindgebruikers vinden wij van essentieel belang. U, onze eindgebruiker, bent namelijk degene die de meest waardevolle terugkoppeling kan geven over hoe wij onze producten en diensten kunnen blijven verbeteren. Ik nodig u dan ook hierbij uit om met ons in contact te treden indien u een suggestie of op en aanmerkingen heeft.

Als laatste wil ik u nog wijzen op de mogelijkheden die u op onze website.

www.humancare.nl zult aantreffen. Naast elektronische documenten (zoals eventuele latere versies van gebruiksaanwijzingen) treft u ook informatie aan over andere producten en Human Care Nederland nieuws.

Met vriendelijke groet,
Human Care Nederland

Inhoudsopgave		
Hoofdstuk	Titel	Bladzijde
1	Tilbanden Functionaliteit	3
2	Maten en Materialen voor Tilbanden	4
3	Typen ophang bevestigingspunten	5
4.1	Het aanbrengen van een actieve Tilband	6
4.2	Het aanbrengen van een passieve Tilband vanuit een zit positie	7
4.3	Het aanbrengen van een passieve Tilband vanuit een liggende positie	8
4.4	Het aanbrengen van een toilet Tilband	9
5	Tilband bevestiging aan het juk	10
6	Product informatie	11
7	Universele onderhoud en wasvoorschriften	12
8	Bekwaamheid van de verzorgende	13
9	Periodieke STIGAH Veiligheid en Keuring	14
	Persoonlijke notities	15

1. Functionaliteit

Actieve banden



Lopen



Staan

Passieve banden



Zitten



Liggen

Doelgroep banden; *actief en passief*



Obesitas



Kinderen



Tilband op Maat (TOM)

2. Maten en Materialen

Maattabel Actief

<i>Maattabel actieve Tilbanden</i>	<i>Rugsteun en Corset</i>	
<i>Borstbreedte</i>	<i>Hoogte van de band</i>	
< 46	10	XXS
46	13	XS
86	10	S
106	17	M
124	17	L
144	20	XL
164	23	XXL

Rugsteunband



Corsetband



Maattabel Passief

Passieve tilbanden	XXS	XS	S	M	L	XL	XXL
Borstomvang in cm	53-67	67-76	76-87	87-97	97-112	112-127	> 127
Lengte in cm	79-114	114-133	133-146	146-156	156-180	180-216	> 216
Kleur codering bias	Wit	Zwart	Rood	Geel	Groen	Blauw	Grijs

Korte transfer net stof



Toilet band



Korte transfer lussen



Verblijfsband SuperFine Plus



Tilbanden zijn in diverse materialen, "stoffen" te verkrijgen

Badstof dik	Badstof dun	Coolnet Longstay	Netstof	Nylon	Superfine plus Longstay	Parasilk

3. Typen ophang bevestigingen aan het Tiljuk

*Door de verschillende ophang bevestigingen kan de tilband voor verschillende typen tilliften gebruikt worden.
Lees voor gebruik van de tilband de gebruiksaanwijzing.
Lees tevens het etiket van de tilband.*

Clips:

Er zijn verschillende typen bevestigingen. Tilbanden met veiligheidsclips kunnen bevestigd worden aan alle tiljukken met paddenstoeltjes die een diameter van 6,8 tot en met 8,2 mm hebben.



Jukken geschikt voor clip banden




Lussen:

Tilbanden met lussen kunnen uitsluitend bevestigd worden aan een tweekantjok met haakjes.



Tiljuk geschikt voor lussen tilband

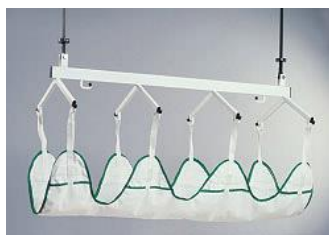

4.1 Het aanbrengen van een Actieve Tilband

- 1 Vertel de cliënt altijd wat er gaat gebeuren.
- 2 Leg de juiste maat tilband klaar.
- 3 De cliënt moet voren bewegen zodat de tilband rond de onderrug geplaatst kan worden



- 4 Zorg dat de armen zich buiten de tilband bevinden.
- 6 Sluit de fixatieband aan de voorzijde.



- 7 Breng de clips of lussen aan het tiljuk.
- 8 Controleer of alle clips goed vastzitten. Sij niet en laat desnoods het juk nog even zakken om de lussen of clips beter aan te leggen.
- 9 Voordat je gaat tillen, kun je nog even kijken of de tilband mooi om het lichaam zit.

4.2 Het aanbrengen van een Passieve Tilband in zitpositie:

Controleer bij een passieve tilband of de baleinen in de hoofddeuk aangebracht zijn

1. Vertel de cliënt altijd wat er gaat gebeuren.
2. Neem positie naast de gebruiker en vraag hem met zijn handen op zijn knieën te steunen en licht naar voren te buigen.
3. Geef de gebruiker een veilig gevoel door met je vrije arm voorlans zachtjes druk te geven op de borstkas. Oefen hierbij geen kracht uit, maar laat hem iets in je arm hangen.
4. Met je andere, vlakke hand duw je de tilband rustig en diep naar beneden achter de rug van de gebruiker tot op de (rol)stoelzitting.



5. Haal de beenslips langs de benen naar voren.
6. Trek de tilband onder de stuit van de cliënt door met één hand aan de beenslip te trekken en met de andere hand tegen de knie te duwen.



7. Haal de beenslips onder de bovenbenen door.
8. Breng de tillift rustig dichterbij.
9. Klik eerst de schouderclips aan en vervolgens de clips bij de beenslips.



10. Controleer of alle clips goed vastzitten. Sij niet en laat desnoods het juk nog even zakken om de lussen of clips beter aan te leggen.
11. Voordat je gaat tillen, kun je nog even kijken of de beenslips mooi glad langs de bovenbenen zitten.

4.3 Het aanbrengen van een Passieve Tilband in liggende positie:

Controleer bij een passieve tilband of de baleinen in de hoofddeuk aangebracht zijn

1. Vertel de cliënt altijd wat er gaat gebeuren.
2. Zet het bed eerst op de goede werkhoogte en het bedhek aan de andere zijde omhoog
3. Draai de cliënt op de zij.
4. Leg vervolgens de helft van de tilband op de goede hoogte op bed en stop de andere helft met je vlakke hand rustig onder de cliënt.



5. Breng de tilband aan van kruin tot stuit.
6. De cliënt kan (zelf) naar je toe kantelen en "in de tilband" rollen.



7. Breng de tillift rustig dichterbij.
8. Klik eerst de schouder clips aan en vervolgens de beenslips.
9. Controleer of alle clips goed vastzitten. Sijor niet en laat desnoods het juk nog even zakken om de lussen of clips beter aan te leggen.



10. Voordat je gaat tillen, kun je nog even kijken of de beenslips mooi glad langs de bovenbenen zitten.

4.4 Het aanbrengen van een toiletband

Let op! Het veilig en comfortabel gebruik van toiletbanden is afhankelijk van de spierspanning van de cliënt.

Controleer bij een toilet tilband of de baleinen in de hoofdsteen aangebracht zijn

Deze tilband, specifiek voor toiletgebruik, biedt ondersteuning door de okselrollen bij de schouders en de extra gepolsterde beenslips. De toiletband is zijn standaard uitgevoerd in nylon. Standaard heeft deze toiletband buikfixatie. Gebruik in combinatie met een passieve tillift; Lexa, Diana of plafondlift

1. Vertel de cliënt altijd wat er gaat gebeuren.
2. Laat het zitgedeelte vrij.
3. Controleer de schouderfunctie van de cliënt voor elke tilhandeling.
4. Neem positie naast de gebruiker en vraag hem met zijn handen op zijn knieën te steunen en licht naar voren te buigen.
5. Geef de gebruiker een veilig gevoel door met je vrije arm voorlangs zachtjes druk te geven op de borstkas. Oefen hierbij geen kracht uit, maar laat hem iets in je arm hangen.
6. Met je andere, vlakke hand duw je de tiband rustig en diep naar beneden achter de rug van de gebruiker tot op de (rol)stoelzitting.



4. Breng de toiletband aan achter de rug van de cliënt en breng de okselrollen onder de armen door naar voren.
5. Breng de hoofdsteen achter het hoofd en bevestig de schouderluitingen, zowel links als rechts.



7. Sluit de (eventuele) buikfixatie.



8. Breng beide beenslips onder het been door van buiten naar binnen.
9. Voordat je gaat tillen, kun je nog even kijken of de tilband mooi om het lichaam zit.



Evalueer de toepassing van een toiletband regelmatig, in ieder geval na elke lichamelijke verandering van de cliënt. Bijvoorbeeld bij afname van het lichaamsgewicht of na een beenamputatie.

5. Tilband bevestigen aan het juk met veiligheidsclip:

1. Plaats de clip over de paddenstoel heen en trek de clip omlaag. De clip gaat automatisch open en sluit zich weer.
2. Controleer of de paddenstoel rondom voelbaar is; dan zit de clip goed. Zorg ervoor dat de clip niet scheef over de paddenstoel wordt getrokken.




Tilband verwijderen met veiligheidsclip:

1. Knijp de twee donkergrijze knoppen in en haal de clip van de paddenstoel.

Tilband bevestigen met lussen:


Het 2-punts juk heeft vier bevestigingspunten waar lussen aan worden bevestigd.

1. Schuif een lus om een van de bevestigingspunten van het tiljuk.
2. Controleer of de lus goed om het bevestigingspunt zit.
3. Herhaal de voorgaande stappen voor de andere bevestigingspunten.
4. De lussen bestaan uit verschillende “deellussen”, door gebruik te maken van deze deellussen kan de cliënt in de gewenste houding gebracht worden.

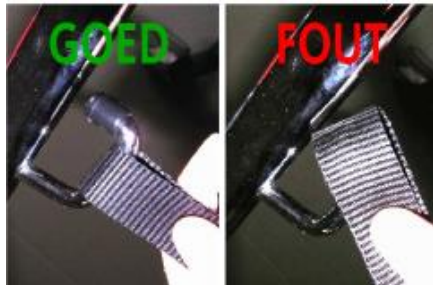

6.Productinformatie

Uw tilband is voorzien van een aantal labels, te weten;

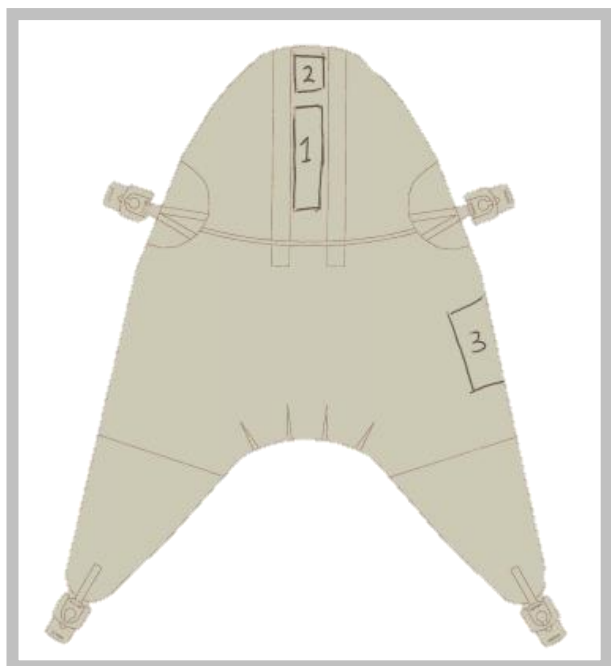

Hier vindt u specifieke informatie over uw band zoals:

1. Soort band, materiaal, serienummer en het wasvoorschrift.
 2. Maatlabel, serienummer en QR-code voor gebruiksaanwijzing en instructie video.
 3. STIGAH service label. Informatie over de keuring van de tilband.
- **Bij actieve rugsteunbanden bevinden de labels zich onder de softe hoes op de binnenband.**



Maatlabel/kleur
Welke maat heeft deze band.



Soort band, materiaal, serienummer en het wasvoorschrift.
STIGAH service label; Informatie over de keuring van de tilband.

7. Universele onderhoud en wasvoorschriften

Gebruik voor iedere cliënt in verband met de hygiëne een eigen tilband en reinig deze regelmatig. De tilband kan in de wasmachine gewassen worden. Kijk op het label voor de maximaal toegestane was temperatuur.

Stop de tilband bij voorkeur in een sloop in de wasmachine voor extra bescherming van de tilband en de wasmachine.

Verwijder van tevoren de eventuele baleinen die voor hoofdondersteuning zorgen.

Verwijder bij actieve tilbanden de antislip mat en de binnenband.

Alleen de fleece hoes van de actieve band kan op 40 graden gewassen worden.

De band zelf kan gewassen worden op 90 graden.

Sluit alle klittenband en overige sluitingen.

Vermijd mechanische druk zoals rollen, wringen, trekken of persen tijdens de was-, en droogprocedure.

Hierdoor kunnen onderdelen van de tilband beschadigen.

Om deze reden mogen tilbanden niet in de droogmachine.

Tilbanden van Coolnet, Superfine Plus, Badstof en Parasilk niet heter wassen dan 60°C en niet drogen in de droogmachine.

Gebruik geen wasmiddel met oplosmiddel.

Het Human Care Nederland geeft 1 jaar garantie op Tilbanden.

Lees de specifieke was informatie op het waslabel (1).

8. Bekwaamheid van de verzorgende

De scholing van medewerkers en/of mantelzorgers die de Tilband aanbrengen, is verplicht voor iedereen die met tilliften werkt en heeft een structureel karakter, bijvoorbeeld eenmaal per jaar (de deelname aan scholing wordt vastgelegd in bijvoorbeeld het personeelsdossier).

Scholing van nieuwe zorgmedewerkers vindt op korte termijn na indiensttreding plaats.

De scholing wordt afgesloten met een toets.

De scholing behoort te bestaan uit een standaardtest van onderdelen, dat betekent dat de kern van iedere scholing (ongeacht door wie gegeven) gelijk is.

De inhoud van de scholing behoort volledig uitgewerkt op papier te staan in een algemeen transferprotocol, zodat dit te allen tijde is na te lezen (het transferprotocol behoort dus ook aanwezig te zijn op een zorgafdeling).

Trainers en/of opleiders van gebruikers behoren aantoonbaar bekwame en opgeleide personen te zijn. (bijvoorbeeld met drie referenties).

9. Periodieke STIGAH keuring

Laat periodiek uw Tilband STIGAH keuren, de keuring bestaat uit een visuele inspectie en een belasting test. Indien de band goedgekeurd is wordt het digitale logboek bijgewerkt en een datum voor de volgende keuring op het label aangebracht.




Veiligheid en Keuring NEN 7506

De gebruiker is verantwoordelijk voor de juiste toepassing en het veilig gebruik van Tilbanden. De gebruiker inspecteert voor gebruik de Tilband op navolgende punten:

- Of de band volledig is en is voorzien van het door de fabrikant voorgeschreven functionele toebehoren;
 - Of het label leesbaar is en volledig (CE markering, leverancier, serienummer, maximaal gewicht, toepassing en wasvoorschrift);
 - Of de Tilband geen rafels, brandgaten, gaten, losse naden en/of scheuren vertonen;
 - Of de baleinen zijn geplaatst; **zonder baleinen mag de Tilband niet gebruikt worden!**
 - Of de clips of lussen niet zijn beschadigd (scheurtjes, verbuiging enz.);
 - Of de band gekeurd is, op het STIGAH inspectie label staat wanneer de eerst volgende keuring uiterlijk moet plaatsvinden. Dit mag niet meer dan een jaar verder zijn.
- In Romeinse cijfers staat het kwartaal en in gewone cijfers het jaartal.



Indien op één van deze punten een defect wordt geconstateerd, moet de tilband onmiddellijk buiten gebruik worden gesteld en worden voorzien van een afkeurlabel.

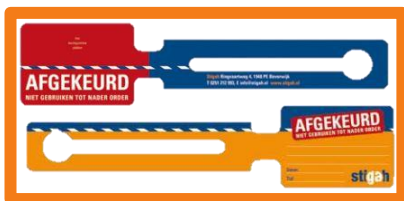

Ten behoeve van de hygiëne moeten het wasvoorschrift en de werkinstructies/tilprotocol daarvan in de instelling, worden opgevolgd.

Incidenten

Alle incidenten en bijna-incidenten met Tilbanden moeten, volgens de Richtlijn Medische Hulpmiddelen (93/42/EEG), ongeacht de schuldvraag, worden gemeld bij de fabrikant en IGZ. Daarnaast moet de leverancier op de hoogte worden gesteld door de eigenaar van de Tilband.

Persoonlijke notities:

Human Care Nederland BV
Elspeterweg 124
8076 PA Vierhouten
Tel: 0577- 41 21 71 Fax: 0577- 41 21 70

© Copyright Human Care Nederland
Niets uit deze publicatie mag worden gekopieerd zonder schriftelijke
toestemming van Human Care Nederland

Document: Gebruiksaanwijzing Tilband -Rev01

Vragen of storingen?
Serviceafdeling
079 363 30 40
service@pronkergo.nl

Zoetermeer

Cobaltstraat 14 -15
2718 RM Zoetermeer
079 361 13 40

Eindhoven

Bedrijvenweg 5
5627 BW Eindhoven
040 248 43 75

Hoogeveen

Plesmanstraat 81
7903 BG Hoogeveen
0528 23 08 58

Sittard

Dr. Nolenslaan 157 B
6136 GM Sittard
046 458 78 62



NL 079 361 13 40
BE 050 32 20 20



info@pronkergo.nl

**Pronk
ergo**

mogelijkheden zonder beperkingen